

## Trouble-Shooting BM 780 II

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Grüne Einschaltkontrolleuchte bleibt dunkel, Elemente auf der Front bleiben dunkel, keine Gerätefunktion	Keine Netzspannung	Überprüfen der Netzversorgung
	Netzkabel an der Steckdose oder am Gerät nicht oder nicht richtig eingesteckt	Anschluss des Netzkabels prüfen
	Gerät nicht eingeschaltet	Gerät einschalten
	Netzsicherung defekt	Überprüfen der Sicherungen im Netzanschluss des Gerätes und ggf. ersetzen. Überprüfen der Netzspannungsangabe auf der Geräterückseite, gegebenenfalls Umstellung der Netzspannung gem. 4.3. Wenn Netzsicherung sofort wieder durchbrennt, liegt ein Fehler im Netztrafo vor.
	Keine Stromart angewählt	Stromart-Taste betätigen
	Sekundärsicherung F2 des Netztransformators defekt, Steuerelektronik defekt	Hauptplatine austauschen.
Grüne Einschaltkontrolleuchte leuchtet, Elemente auf der Front funktionieren normal, aber keine HF-Ausgangsleistung Aktivierungston ertönt	Sekundärsicherung F1 des Netztransformators defekt, HF-Erzeuger defekt (evtl. Endstufentransistor)	Hauptplatine austauschen
Grüne Einschaltkontrolleuchte leuchtet, Elemente auf der Front funktionieren normal, aber keine HF-Ausgangsleistung Aktivierungston ertönt nicht	Fehler im Sollwertpotentiometer oder seinem Anschluss	Sollwertpotentiometer austauschen
Grüne Einschaltkontrolleuchte leuchtet, Elemente auf der Front funktionieren normal, aber keine HF-Ausgangsleistung Neutralelektroden-Alarmton ertönt	Kabelbruch in Neutralelektrode	Neutralelektrode ersetzen
	Zweiteilige NE unzureichend an Patient appliziert	Anlegestelle der NE überprüfen

<p>Andere elektrische Geräte werden bei Aktivierung des BM780II gestört</p>	<p>Hochfrequenz stört über Abstrahlung und Netzleitungen andere Geräte</p>	<p>Verringern der Störübertragung durch:          -Aufstellen des BM780II in größerem Abstand zum gestörten Gerät.          -Anschluss des BM780II an eine andere Netzsteckdose</p> <hr/> <p>Bei Anwendung der Bipolaren Technik werden durch kürzere Stromwege weniger HF-Aussendungen verursacht</p>
---	--	--